

InterDry® accroît la satisfaction du patient, en plus d'être le protocole de traitement privilégié par rapport aux traitements traditionnels¹

Évaluation des patients utilisant InterDry¹

Objectif

L'objectif de l'évaluation du produit Interdry® est de vérifier sa capacité à prendre en charge les problèmes associés aux plis cutanés.

Méthodologie

Cette évaluation du produit a compris au total 54 évaluations de sujets présentant des zones cutanées atteintes, à différents endroits du corps. L'évaluation du produit a été réalisée au Canada, entre 2014 et 2016. InterDry a été appliqué sur les zones affectées au niveau des plis cutanés. L'utilisation d'InterDry a été évaluée par un professionnel de la santé sur une échelle de 1 à 5 selon les critères suivants : facilité d'utilisation, amélioration de la peau après 5 jours, capacité à évacuer l'humidité, capacité à réduire les odeurs, capacité à réduire la douleur, capacité à réduire l'inconfort et satisfaction générale du patient. Selon les instructions d'utilisation américaines et canadiennes, chaque morceau de tissu InterDry peut être utilisé jusqu'à 5 jours, en fonction de l'état de souillure du tissu, de la quantité d'humidité et de l'état

général de la peau. De ce fait, on part du principe que ces informations ont été prises en compte durant l'évaluation du produit.

Répondants

54 répondants au total ont évalué InterDry, voir le « Tableau 1 », pour les caractéristiques des sujets à l'étude. La répartition des zones du corps affectées est représentée dans l'illustration 1.

Dans l'évaluation du produit, les répondants ont été interrogés sur les produits qu'ils utilisaient couramment. Les produits utilisés variaient : pour certains aucun produit n'était utilisé, pour d'autres, des poudres, des gazes ou différents types de produits topiques, avec ou sans antifongique.



	Nombre (total)	Nombre (questionnaire version 1)	Nombre (questionnaire version 2)
Nombre de répondants	54	36 (67%)	18 (33%)
Sexe			
Homme	18 (33%)	15 (42%)	3 (17%)
Femme	33 (61%)	21 (58%)	12 (67%)
S.O.	3 (6%)	0 (0%)	3 (17%)
Âge			
21-30 ans	1 (2%)	1 (3%)	0 (0%)
31-40 ans	6 (11%)	5 (14%)	1 (6%)
41-50 ans	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Plus de 50 ans	35 (65%)	28 (78%)	7 (39%)
S.O.	12 (22%)	2 (6%)	10 (56%)
Type d'établissement			
Soins en milieu communautaire	1 (2%)	4 (11%)	2 (11%)
Soins de courte durée	24 (44%)	20 (56%)	4 (22%)
Soins de longue durée	22 (41%)	10 (30%)	12 (67%)
Autres (soins complexes)	1 (2%)	1 (3%)	0 (0%)
S.O.	1 (2%)	1 (3%)	0 (0%)
Durée de l'évaluation			
Échélonnage (en jours)	3-31	3-31	3-28
Moyenne (en jours)	10.4 (N=42)	10.2 (N=27)	10.7 (N=15)
Médiane (en jours)	9.5 (N=42)	9.0 (N=27)	10.0 (N=15)

Tableau 1 : Caractéristiques de base des sujets inclus


S.O. : Données manquantes ou non évaluées / champs vides ou mal remplis

Échélonnage


Zone du corps affectée	Nombre de répondants
Cou	2
Aisselle	2
Sous les seins	15
Dos	0
Abdomen	14
Aine	14
Doigts	0
Cuisse	0
Membres inférieurs	0
Entre les orteils	1
Plus de 1	12

Illustration 1 : Répartition des zones du corps affectées


Résultats

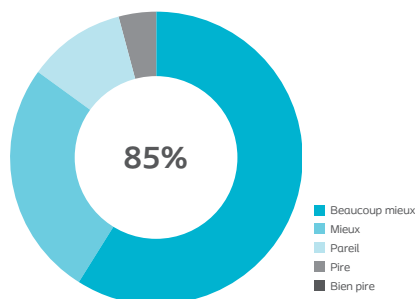


Note « beaucoup mieux » ou « mieux » pour l'état de la peau

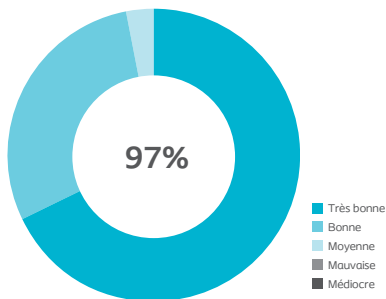


Note « très bonne » ou « bonne » pour la capacité à réduire l'inconfort

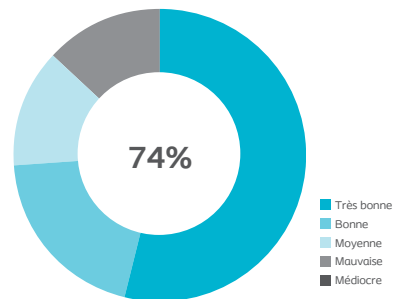


Note « très bonne » ou « bonne » pour la capacité à réduire la douleur

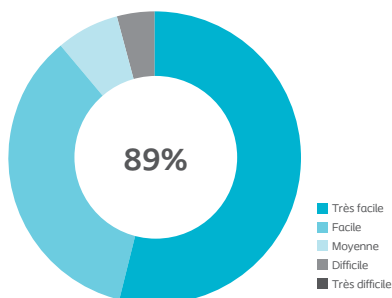


Note « très facile » ou « facile » pour la facilité d'utilisation

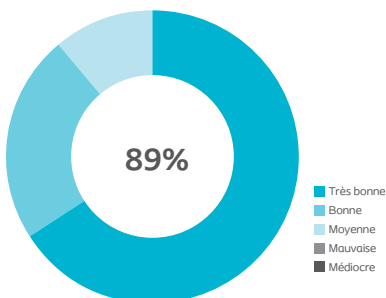


Note « très bonne » ou « bonne » pour la capacité à évacuer l'humidité

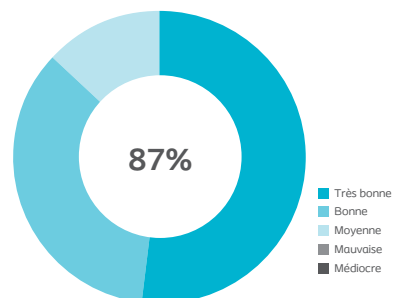


Note « très bonne » ou « bonne » pour la capacité à réduire les odeurs

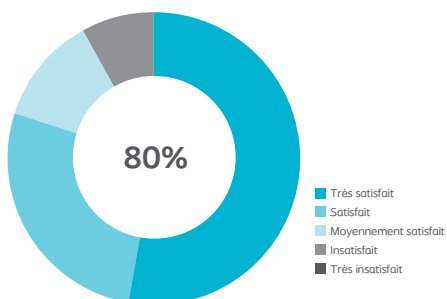

Note « très satisfait » ou « satisfait » pour la satisfaction générale du patient

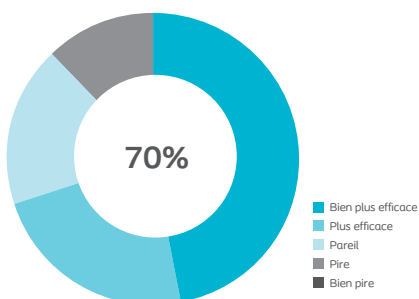

Jugé « bien plus efficace » ou « plus efficace » que le produit couramment utilisé

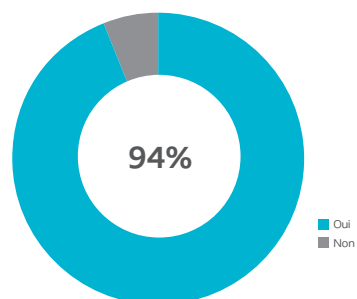

Recommanderiez-vous InterDry® à l'avenir?